

## Gebruiksaanwijzing

### Clean 'n Easy Hygiënisch

#### Beoogd gebruik:


Reinigen van niet-invasieve medisch hulpmiddelen en andere harde oppervlakken in o.a. zorginstellingen, verpleegtehuizen, bejaardentehuizen etcetera.

#### Hoe te gebruiken:

1. Was uw handen,
2. Trek handschoenen aan (voor hygiënische redenen) \*
3. Open de doseerschuif op de deksel van de emmer en trek er een reinigingsdoek uit,
4. Sluit de doseerschuif op de deksel van de emmer goed,
5. Reinig het oppervlak met de kant-en-klare reinigingsdoek, als de doek te droog wordt dient er een nieuwe doek uit de emmer gepakt te worden,
6. Gooi de gebruikte doeken weg in een afvalbak,
7. Trek uw handschoenen uit en gooi deze weg in de afvalbak,
8. Was uw handen.

\* trek nieuwe handschoenen aan als u naar een andere ruimte gaat om kruisbesmetting te voorkomen.

Het product is voor single-use gebruik.

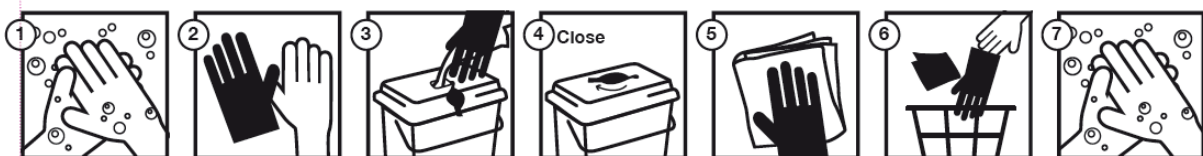

#### Veiligheid:

Gevaar:



Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lees altijd het Veiligheidsinformatieblad

**Na inademen** : Bij overmatig inademen van de damp de persoon in de frisse lucht brengen.

**Na huidcontact** : Bij normaal gebruik worden geen schadelijke werkingen op de huid verwacht.

**Na contact met de ogen** : Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Spoelen met stromend water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts indien irritatie aanhoudt.

**Na inslikken** : Niet van toepassing.

## Gebruiksaanwijzing

### Clean 'n Easy Hygiënisch

---

#### Variations

02036004 Clean 'n Easy Hygiënisch in doseeremmer (1x150 towels)  
02036014 Clean 'n Easy Hygiënisch navul (3x150 towels)

**Bewaartemperatuur** : 5-25°C  
**Houdbaarheid** : zie label

